


# スタンダードQ COVID-19 Ag 取扱説明書

体外診断用医薬品 製造販売承認番号 30300EZ00067000  
検査を実施する前によくお読みください。

malcom

## [製品構成]

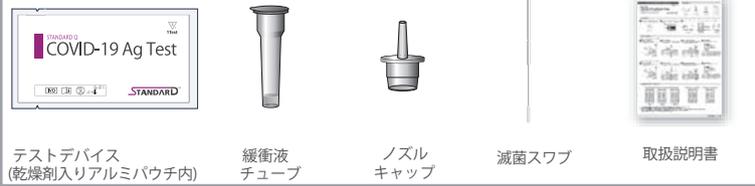

テストデバイス (乾燥剤入りアルミパウチ内) 緩衝液 チューブ ノズル キャップ 滅菌スワブ 取扱説明書

## [準備]

- 本書をよくお読みください。
- アルミパウチに記載されている有効期限をご確認ください。期限切れの場合使用しないでください。
- 開封後アルミパウチ内の乾燥剤が黄色であることを確認してください。乾燥剤の色が緑色の場合、下記コールセンターまでお電話ください。



<アルミパウチ>



<テストデバイス>



黄色: 有効  
緑色: 無効

● 黄色

● 緑色



▲ 黄色: 有効  
▲ 緑色: 無効

<乾燥剤>

## [使用方法]

鼻咽頭ぬぐい液を滅菌スワブを使用して採取します

- スワブを鼻孔から下図の咽頭後壁まで挿入します。
- 咽頭後壁表面にスワブを5秒間当て粘膜炎皮を採取します。

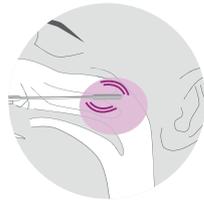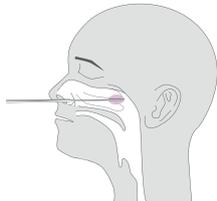




鼻腔ぬぐい液を滅菌スワブを使用して採取します  
家庭や職場での自己検査の場合こちらを実施します。

- スワブを鼻腔に沿って2cm程度挿入します。
- 5回程度回転させ 検体を採取します。そのまま5秒間静止後ゆっくり引き抜きます。



注意) 鼻汁量が多すぎる場合フィルタの詰まりを起こす場合がございます。

- 緩衝液チューブの側面を押しながらかスワブを5回まわします。
- 緩衝液チューブの側面を押し液体をスワブから絞りだすように引き抜きます。
- 緩衝液チューブにノズルキャップを確実に取り付けます。
- テストデバイスの検体滴下部に3滴滴下します。
- 15~30分の間に結果を読み取ります。

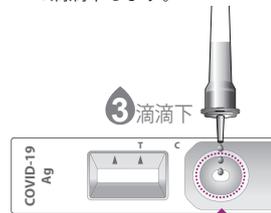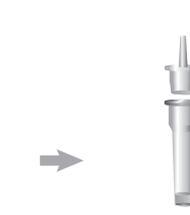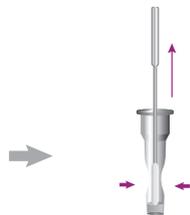


15-30 mins

結果読み取り  
15-30分の間  
無効  
30分以降



誤判定の恐れがあるため、  
30分以降の結果は無効です。

[検査結果の判定] 判定部上部のコントロールライン (C) が認められた場合は測定が正しく行われたことを示します。

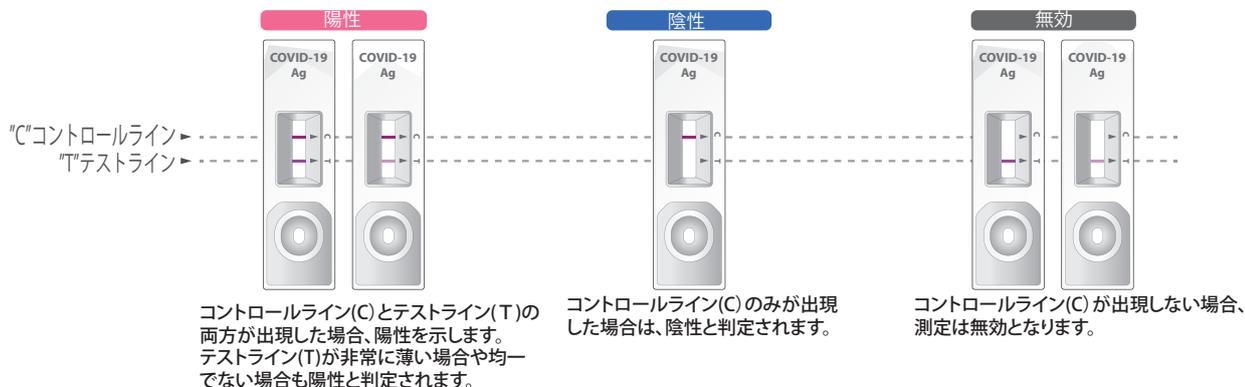

コントロールライン(C)とテストライン(T)の両方が出現した場合、陽性を示します。テストライン(T)が非常に薄い場合や均でない場合も陽性と判定されます。

コントロールライン(C)のみが出現した場合は、陰性と判定されます。

コントロールライン(C)が出現しない場合、測定は無効となります。



- 抗原検査は発症後9日以内を目的に実施してください。
- 判定が陽性の場合かかりつけ医、もしくは自治体の相談センターにご相談してください。

製造元

SD BIOSENSOR

C-4&5Floor, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,  
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,  
REPUBLIC OF KOREA  
Tel +82-31-300-0400 | Fax +82-31-300-0499

輸入販売元

株式会社 マルコム

〒151-0071  
東京都渋谷区本町4-15-10  
e-mail: mdinfo@malcom.co.jp  
URL: http://www.malcom.co.jp

製品に関するお問い合わせ先  
マルコム コールセンター

0120-901-656

9:00~17:00(土・日・祝祭日のぞ)  
電話番号をよくお確かめの上、おかけ頂きますようお願いいたします。

20220518